

ARK™ Lamotrigine kontrole

ARK Diagnostics, Inc. lietošanas instrukcija ARK Lamotrigine kontrole pirms lietošanas rūpīgi jāizlasa. Attiecīgi ievērot lietošanas instrukciju. Testa rezultātu ticamību nevar garantēt, ja ir kādas novirzes no šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.











KLIENTU SERVISS

 ARK Diagnostics, Inc.
48089 Fremont Blvd
Fremonta, CA 94538 ASV
Tel: 1-877-869-2320
Fax: 1-510-270-6298
customersupport@ark-tdm.com
www.ark-tdm.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Hāga
Nīderlande

IZMANTOTIE SIMBOLI

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
|  | Partijas numurs |  GGGG-MM-DD | Izlietot līdz/ Derīguma termiņš |
|  | Kataloga numurs |  | Ražotājs |
|  | Pilnvarotais pārstāvis |  | CE marķējums |
|  | In Vitro diagnostika Medicīnas ierīce |  | Temperatūras ierobežojumi |
|  | Skatīt lietošanas instrukciju |  | Kvalitātes kontrole |
| Rx Only | Lietošana ar recepti | | |

1. NOSAUKUMS

ARK™ Lamotrigine kontrole

2. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

ARK Lamotrigine kontrole ir paredzēta ARK Lamotrigine testa kvalitātes kontrolei,
REF 5023-0001-00.

3. SATURS

ARK Lamotrigine kontrole sastāv no sintētiskas proteīna matricas ar sekojošām lamotrigīna koncentrācijām:

| REF | Produkta apraksts | Daudzums/Tilpums |
|--------------|---|--------------------|
| 5023-0003-00 | ARK Lamotrigine kontrole* Lamotrigīns, buferšķīdums, lielopa seruma albumīns, un konservanti (nomināls daudzums) | Pudelīte ar pipeti |
| | LOW (2.00 µg/mL) | 1 X 4 mL |
| | MID (12.00 µg/mL) | 1 X 4 mL |
| | HIGH (25.00 µg/mL) | 1 X 4 mL |

*Lai pārveidotu µg/mL lamotrigīnu uz µmol/L, reizināt µg/mL ar 3.90. Lamotrigīna līmeņi pārveidojas uz 7.80, 46.80, un 97.50 trijām kontrolēm.

Katrai laboratorijai jānosaka savi diapazoni katrai jauni kontrolju partijai.

4. BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI

- Lietošana *In Vitro diagnostikai*
- Nejaukt kalibratorus ar dažādiem partijās numuriem.
- Katru partiju lietot kā komplektu.

5. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Lai iegūtu pilnīgu lamotrigīna testa kopsavilkumu un skaidrojumu, skatīt ARK Lamotrigine testa lietošanas instrukciju.
- Kontroles ir gatavas lietošanai. Pirms lietošanas maigi samaisiet katru līmeni.
- Katram līmenim izspiest pietiekamu daudzumu (~40µL/drop) atsevišķos paraugu traukos. Skatiet instrumentam raksturīgās parauga tilpuma prasības. Vāciņus novietot to oriģinālajos konteineros un turiet cieši.
- Uzglabāt 2-8°C temperatūrā. Lietot pirms derīguma termiņa beigām. Pēc atvēršanas pudelītes var uzglabāt 2-8°C temperatūrā 12 mēnešus līdz derīguma termiņa beigām.

6. PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Precīzi un atkarājami rezultāti ir atkarīgi no pareizi funkcionējošiem instrumentiem, reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm, produkta atbilstošas uzglabāšanas un piemērotas laboratorijas tehnikas.

7. PREČUZĪMES

ARK™ ir preču zīme ARK Diagnostics, Inc.
Citi zīmolu vai produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.