


ARKTM Zonisamide Calibrator

Este folheto informativo da ARK Diagnostics, Inc. para o Calibrador da Zonisamida ARK deve ser lido atentamente antes da utilização. Devem seguir-se as instruções contidas no folheto informativo. A fiabilidade dos resultados do ensaio não pode ser garantida se houver quaisquer desvios das instruções contidas neste folheto informativo.

Serviço de atendimento ao cliente

 **ARK Diagnostics, Inc.**
 48089 Fremont Blvd
 Fremont, CA 94538 USA
 Tel: 1-877-869-2320
 Fax: 1-510-270-6298
 customersupport@ark-tdm.com
 www.ark-tdm.com

 **EC REP**
 Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP Haia
 Países Baixos

Símbolos utilizados

	Código do lote	 AAAA-MM-DD	Consumir até/Data de validade
	Número do catálogo		Fabricante
	Representante autorizado		Marca CE
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro		Limite de temperatura
	Consulte as instruções de utilização		Calibrador
Rx Only	Requer prescrição médica		

1 Nome

ARKTM Zonisamide Calibrator

2 Utilização prevista

O calibrador da Zonisamida ARK é indicado para ser usado na calibração do Ensaio da Zonisamida ARK, **REF** 5022-0001-00.

3 Conteúdo

O calibrador de Zonisamida ARK compreende uma matriz de proteína sintética com as seguintes concentrações de zonisamida:

REF	Descrição do produto	Quantidade/Volume	
5022-0002-00	ARKTM Zonisamide Calibrator Zonisamida, tampão, seroalbumina bovina e conservantes	Frascos com conta-gotas	
	A	0,0 µg/mL	1 X 4 mL
	B	2,5 µg/mL	1 X 2 mL
	C	7,5 µg/mL	1 X 2 mL
	D	20,0 µg/mL	1 X 2 mL
	E	40,0 µg/mL	1 X 2 mL
	F	80,0 µg/mL	1 X 2 mL

4 Padronização

Não existe padrão internacionalmente reconhecido para a zonisamida. Os níveis dos calibradores da Zonisamida ARK são preparados através de diluição gravimétrica de topiramato altamente puro numa matriz proteinácea sintética livre de zonisamida.

5 Advertências e precauções

- Para utilização de **diagnóstico *In Vitro***.
- Não misture os calibradores de números de lote diferentes.
- Utilize cada lote como um conjunto.

6 Instruções de utilização

- Para um resumo completo e explicação do ensaio da zonisamida, consulte o folheto informativo relativo ao ensaio da zonisamida ARK.
- Os calibradores estão prontos para a utilização. Inverta cada Nível suavemente antes de dosar.
- Aplique volume suficiente (~40µL/gota) em copos de amostra individuais para cada nível. Consulte os requisitos de volume de amostras específicos para o instrumento. Recoloque as tampas nos seus recipientes originais e mantenha-os fechados.
- Armazene a 2-8°C. Utilize antes da data de expiração.

7 Procedimento

Calibração

Efetue um procedimento de calibração completo (6 pontos), teste calibradores em duplicado. Verifique a curva da calibração com no mínimo dois níveis de controlos da qualidade de acordo com o plano de garantia da qualidade de laboratório.

Quando recalibrar

- Sempre que sejam utilizados reagentes de um número de lote novo
- Sempre que seja indicado pelos resultados dos controlos da qualidade
- Sempre que seja requerido por protocolos laboratoriais padrão

8 Limitações do procedimento

Resultados precisos e reproduzíveis dependem de instrumentos que funcionem apropriadamente, de reagentes, calibradores, controlos e armazenagem do produto conforme instruído e boas práticas de laboratório.

9 Marcas registadas

ARKTM é marca registada da **ARK** Diagnostics, Inc.

Outras marcas e nomes de produtos são marcas registadas dos seus respetivos proprietários.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Impresso nos EUA
Revisão em Fevereiro de 2017
1600-0173-00PT Rev 03