

ARK™ Tramadol kontrole

ARK Diagnostics, Inc. lietošanas instrukcija ARK Tramadol kontrole pirms lietošanas ir jāizlasa. Attiecīgi ievērot lietošanas instrukciju. Testa rezultātu ticamību nevar garantēt, ja ir kādas novirzes no instrukcijām šajā lietošanas instrukcijā.

KLIENTU SERVISS


ARK Diagnostics, Inc.











48089 Fremont Blvd
Fremonta, CA 94538 ASV
Tel: 1-877-869-2320
Fax: 1-510-270-6298

customersupport@ark-tdm.com
www.ark-tdm.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Hāga
Nīderlande

IZMANTOTIE SIMBOLI

	Partijas numurs	 GGGG-MM-DD	Izlietot līdz/ Derīguma termiņš
	Kataloga numurs		Ražotājs
	Pilnvarotais pārstāvis		CE marķējums
	Skatīt lietošanas instrukciju		Kvalitātes kontrole
	Temperatūras ierobežojumi		<i>In Vitro</i> Diagnostika Medicīnas ierīce
Rx Only	Lietošana tikai ar recepti		

1. NOSAUKUMS

ARK™ Tramadol kontrole

2. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

ARK Tramadol kontrole ir paredzēta lietot ARK Tramadol testa kvalitātes kontrolei.

3. SATURS

ARK Tramadol kontrole sastāv no nesterila, apstrādāta cilvēka urīna matricas ar zemāk tabulā norādīto tramadola koncentrāciju.

REF	Produkta apraksts	Daudzums/Vērtība
5040-0003-00	ARK Tramadol kontrole Tramadols, cilvēka urīns, stabilizators un nātrija azīds	Pudelīte ar pipeti
	ZEMS / Negatīvs (75 ng/mL)	2 X 10 mL
	AUGSTS / Pozitīvs (125 ng/mL)	2 X 10 mL

Izsekojamība un vērtību piešķiršana: Sertificēts tramadola šķīdums ir izsekojams HPLC. Pārbaudi veic ar ARK Tramadol testu, kas kalibrēts ar ARK Tramadol kalibratoru.

Katrai laboratorijai jānosaka savi diapazoni katrai jaunai kontroļu partijai, kuri balstīti uz saviem kritērijiem un savu testu sistēmu.

Kvalitatīvajā režīmā, zemajai kontrolei jābūt negatīvai un augstajai jābūt pozitīvai attiecīgi 100 ng/mL robežkalibratora.

Kontroles ir veidotas ar nesterilu, tramadolu nesaturošu apstrādātu cilvēka urīnu. Donori nebija reaģējoši uz HIV 1/2, HBsAg, HCV, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) un RPR.

4. BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Lietošana *In Vitro* diagnostikai. Lietošana tikai ar recepti.
- Kaitīgs norijot.
- Satur cilvēka urīnu. Rīkoties kā potenciāli infekciozu.
- Nejauciet kopā kontroles ar dažādiem partijām numuriem.
- Lietot katru partiju kā komplektu.
- Produkts satur ≤0.09% nātrija azīda. Piesardzības nolūkos skartā santehnika, ieskaitot instrumentus, atbilstoši jānomazgā ar ūdeni, lai mazinātu iespējamo sprādzienbīstamo metāla azīdu uzkrāšanos.

5. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Lai iegūtu pilnīgu Tramadola testa kopsavilkumu un skaidrojumu, skatiet Tramadola testa lietošanas instrukciju.
- Kalibratori ir gatavi lietošanai. Pirms lietošanas maigi samaisiet katru līmeni.
- Katram līmenim izspiest pietiekamu daudzumu (~40µL/piliens) atsevišķos paraugu traukos. Skatiet instrumentam raksturīgās parauga tilpuma prasības. Vāciņus novietot to oriģinālajos konteineros un turēt cieš.
- Uzglabāt 2-8° temperatūrā. Lietot pirms derīguma termiņa beigām.

6. PROCEDŪRAS IEROBEŽOJUMI

Precīzi un atkārtojami rezultāti ir atkarīgi no pareizi funkcionējošiem instrumentiem, reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm, produkta atbilstošas uzglabāšanas un piemērotas laboratorijas tehnikas.

7. PREČUZĪMES

ARK™ ir preču zīme ARK Diagnostics, Inc.

Citi zīmolu vai produktu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.